

TeleDart Injektionspistole RD206 / RD206-D

Einleitung / Vorwort

Sehr geehrter Kunde,

Sie sollen wissen, dass wir mit unserer ganzen Energie und Leidenschaft hinter unseren Produkten stehen und Ihre Entscheidung die richtige Wahl ist. Wir freuen uns darauf, Ihnen für eine lange Zeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Ihnen den Service zu bieten, der der Qualität unserer Produkte entspricht. Unsere Überzeugung und unser Vertrauen in unsere Produkte machen es uns möglich, Ihnen eine Funktionsgarantie für die nächsten 20 Jahre zu gewähren.

Damit Sie sicher und ohne Probleme Ihre Distanzinjektionen durchführen können, bitten wir Sie jedoch, diese Gebrauchsanleitung sorgfältig zu studieren und die darin enthaltenen Anweisungen und Hinweise zu beachten.

Wir wünschen Ihnen bei Ihren Einsätzen viel Erfolg!

Ihr TeleDart®-Team

Drucktabelle für das TeleDart®- Gerät RD206 / RD206-D

Sehr geehrter Kunde,

danke, dass Sie sich für ein TeleDart® Gerät entschieden haben.

Dieses Gerät wurde geprüft und in geschlossenen Räumen eingeschossen.

CO2 AIR Serien-Nr.: _____

Entfernung: 15m

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angegebenen Werten lediglich um Richtwerte handelt, welche von den Ihren abweichen können, da Witterungseinflüsse und die Zielsicherheit des Schützen Einfluss auf die Schussergebnisse haben können.


Zieleinrichtung	Projektil	Lauf (Kal.)	Druck
Standardvisier		11 mm	bar
Zielfernrohr		11 mm	bar
Rotpunkt		11 mm	bar

Zieleinrichtung	Projektil	Lauf (Kal.)	Druck
Standardvisier		13 mm	bar
Zielfernrohr		13 mm	bar
Rotpunkt		13 mm	bar

Zieleinrichtung	Projektil	Lauf (Kal.)	Druck
Standardvisier		16 mm	bar
Zielfernrohr		16 mm	bar
Rotpunkt		16 mm	bar

TeleDart GmbH & Co. KG

TeleDart Injektionspistole RD206

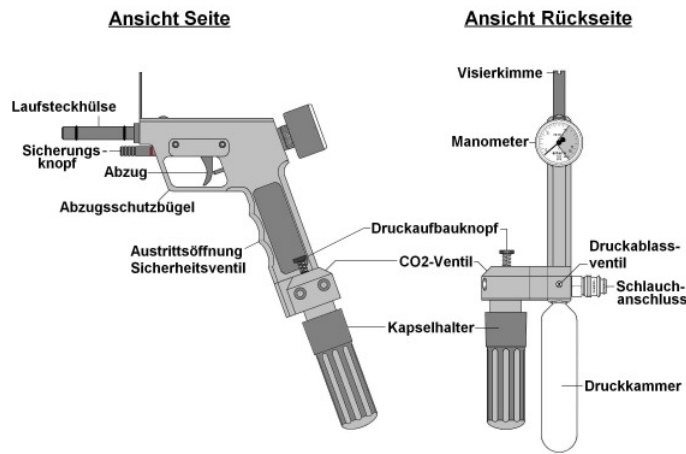

Technische Daten

Einsatzbereich	1 – 30 m
Gewicht	1,0 kg
Material Grundkörper/Lauf	Aluminium grau/schwarz (eloxiert)
Länge ohne Lauf	27 cm
Lauflänge	70 cm
Länge mit Lauf	91 cm
Aufstecklauf 11mm oder 16mm	schnell einsetzbar
Kaliber / Spritzenvolumen	und/oder 11mm (1 - 5ml Pfeile) 16mm (1-20ml Pfeile) 13mm (3-20ml Pfeile)
Druckregulierung (stufenlos)	CO2 und/oder Luftpumpe
Links- oder Rechtshänderpistole	wahlweise
Sicherheitsventil	ja
Abzugssicherung	ja
Visiereinrichtung (Standard)	Kimme und Korn
Visierschiene für Zieloptik	nachrüstbar
Zieloptik	Zubehör
Manometer (Güteklasse 1.6) RD206	10bar
Manometer (Güteklasse 1.6) RD206-D	6bar
Bewegungsenergie	> 7,5 Joule

1. Lieferumfang / Vollständigkeit

Bitte überprüfen Sie bei Empfang umgehend, ob die Lieferung:

- ✓ vollständig ist
- ✓ der bestellten Ausführung entspricht
- ✓ unbeschädigt ist

Eventuelle Beanstandungen müssen unmittelbar, spätestens jedoch 2 Tage nach Erhalt der Lieferung schriftlich (per Brief (Datum Poststempel)/ Fax oder E-Mail) direkt an uns gerichtet werden.

Unser Service garantiert Ihnen eine sofortige Bearbeitung Ihrer Beanstandung.

2. Sicherheitshinweise

Zielen Sie nie auf andere Personen oder in eine unüberschaubare Richtung.

Halten Sie beim Umgang mit dem Gerät den Lauf stets zum Boden gerichtet.

Achten Sie darauf, dass das Gerät immer gesichert ist und erst kurz vor dem Schuss entsichert werden darf.

Beachten Sie, dass das Gerät einen maximalen Gefahrenbereich von ca. 100 Metern hat und dass sich in diesem Bereich keine Personen aufhalten oder öffentliche Wege, Plätze oder Straßen befinden.

Sammeln Sie alle Projektile und Projektilteile nach dem Einsatz stets wieder ein, auch wenn diese entleert bzw. beschädigt sein sollten.

Vermeiden Sie, dass Kinder oder andere unbefugte Personen in den Besitz von Projektilen und Projektilteilen gelangen.

Reinigen Sie mit Medikamenten kontaminierte Projektile und Projektilteile, bevor Sie diese entsorgen.

Benutzen Sie das Gerät nie unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten.

Benutzen Sie das Gerät nie in Verbindung mit reinem Sauerstoff (z.B. Sauerstoffkapseln etc.)!

Weiterhin gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Waffen-, Arznei- und Betäubungsmittelgesetzes sowie des Tierschutzrechts.

Beachten Sie außerdem die in der Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise.

Erkennbare Schäden

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder sonstige Einwirkung erkennbar sind, darf das Gerät nicht mehr eingesetzt werden. In diesem Fall muss der Lauf sofort entfernt, ein eventuell vorhandenes Projektil herausgenommen und das Gerät in den drucklosen Zustand versetzt werden. Dies bedeutet die vorsichtige Entfernung der CO₂-Kapsel oder Pressluftkartusche sowie die vollständige Entleerung der Druckkammer. Setzen Sie sich im Schadensfall umgehend mit Ihrem Händler oder direkt mit uns in Verbindung.

3. Handhabung und Bedienung

Vor dem Erstgebrauch

Machen Sie sich bitte mit den einzelnen Bedienelementen des Gerätes vertraut, bevor Sie in die Praxis übergehen.

TeleDart® Pistolen RD206 können sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder ausgelegt werden, sodass Sie Ihr Gerät den individuellen Erfordernissen anpassen können.

Alle TeleDart® Geräte werden von uns auf eine Entfernung von 15 m eingeschossen. Hierzu verwenden wir eine TeleDart® Pfeilspritze 3ml.

Zum Einschießen empfehlen wir den Spritzenpfeil mit Wasser zu füllen und eine Übungskanüle zu verwenden. Ein Druckaufbau in der Spritze ist für Übungszwecke nicht erforderlich. Wenn Sie andere Spritzenvolumen verwenden müssen, verfahren Sie wie oben angegeben. Um eine optimale Ballistik zu gewährleisten, muss die Medikamentenkammer der Spritze immer komplett gefüllt sein. Notieren Sie Ihre Druckwerte für die nächsten Einsätze.

Zusammensetzen des Gerätes

- Einsetzen der CO₂-Kapsel (*Version RD206-CO₂*)

Schrauben Sie den Kapselhalter ab und legen Sie die CO₂-Kapsel ein. Anschließend drehen Sie den Kapselhalter wieder fest bis die Kapsel angestochen ist.

Angestochene Kartuschen dürfen erst ersetzt werden, wenn sie restlos leer sind. Weiterhin gelten die auf der Packung der CO₂-Kapseln angebrachten Warnhinweise. Für Personen- oder Sachschäden, die durch vorzeitige Entfernung oder unsachgemäße Handhabung der Kapseln entstehen, schließen wir jegliche Haftung aus.

- Anschließen der Luftpumpe (*Version RD206-AIR*)

Die Schnellsteckkupplung befindet sich seitlich am unteren Ende des Griffes. Stecken Sie den Schlauch der Luftpumpe in die Schnellsteckkupplung und drücken Sie diesen ein bis er spürbar einrastet. Zum Entfernen des Schlauches muss der Schlauchanschluss der Schnellsteckkupplung zurückgezogen werden, bis der Schlauch herauspringt.

- Sicherung

Prüfen Sie ob das Gerät in gesichertem Zustand ist. Hierbei muss der Sicherungsgriff in das Gerät eingedrückt sein, sodass der rote Ring nicht mehr sichtbar ist.

- Druckaufbau

Der Druckaufbau erfolgt, in dem Sie den Druckaufbauknopf nach unten drücken. Beobachten Sie dabei die Druckanzeige und lassen Sie den Knopf los, sobald der gewünschte Druck erreicht ist.

Beim Druckaufbau per Luftpumpe muss nach jedem Schuss die Luftpumpe wieder angeschlossen und Druck aufgebaut werden.

Sollten Sie einen zu hohen Druck aufgebaut haben, können Sie diesen auch wieder ablassen. Drücken Sie dabei das Druckablassventil ein, bis der gewünschte Druck erreicht ist.

Die Pistole TeleDart® RD206 verfügt über ein Sicherheitsventil, welches sich öffnet, sobald der Druck das vorgegebene Maximum übersteigt (s. Techn. Daten).

Das Sicherheitsventil schützt das Gerät vor gefährlichem Überdruck und somit vor Schäden. Ein vorsätzliches Überschreiten des jeweiligen Höchstdruckes in den roten Bereich der Manometeranzeige kann Ihr Gerät beschädigen. Bei Sachschäden, die auf absichtliches Überschreiten des Höchstdruckes zurück zu führen sind, erlischt die Garantie!

Für Personen- oder Sachschäden, die nachweislich durch Manipulation am Sicherheitsventil entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

- Einsetzen der Spritze

Führen Sie die Spritze von hinten in den Lauf ein, bis sich der Flugstabilisator vollständig im Lauf befindet.

- Schieben Sie den Lauf von vorne bis zum Anschlag auf die Laufaufsteckhülse und drehen Sie ihn bis die Kornspitze senkrecht nach oben zeigt.

- Das Schießen

Das Gerät ist nun schussbereit und muss nur noch entsichert werden. Ziehen Sie hierzu den Sicherungsgriff in Schussrichtung bis zum Anschlag heraus bis der rote Ring sichtbar ist. **Der Abzug muss zügig durchgedrückt werden, um einen präzisen Schuss zu gewährleisten.**

Sichern Sie das Gerät unmittelbar nach dem Schuss wieder, in dem Sie den Sicherungsgriff bis zum Anschlag in das Gerät eindrücken, sodass der rote Ring nicht mehr sichtbar ist.

4. Pflege

Bei äußerlicher Verschmutzung können Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch abwischen. Verwenden Sie auf keinen Fall chemische Reinigungsmittel oder Öl.

Der Lauf sollte grundsätzlich vor Gebrauch auf innere Verschmutzungen geprüft und ggf. mit der Laufreinigungsbürste (beiliegend) trocken gereinigt werden. Verwenden Sie auch hier auf keinen Fall chemische Reinigungsmittel oder Öl.

Weitere Pflegemaßnahmen sind nicht erforderlich.

5. Wartung

Es sind keine besonderen Wartungsmaßnahmen erforderlich. Sollte der Lauf schwer aufzuschieben sein, so können die O-Ringe auf der Laufsteckhülse leicht gefettet werden (Lauffett im Lieferumfang).

6. Lagerung

Für die Lagerung und Aufbewahrung sowie für den Transport gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Das Gerät sollte stets trocken und in gesichertem Zustand gelagert werden. CO₂-Kapseln können im Gerät verbleiben.

Nach längerer Lagerdauer sollte das Gerät vor Verwendung auf seine Funktionen hin geprüft werden.

7. Sonderzubehör

Nachfolgend finden Sie unser Sortiment an Sonderzubehör für Ihr Gerät:

- Montageschiene für Zieloptik
- Zieloptik: Rotpunkt
- Entfernungsmesser (nicht montierbar)
- Adapter für 45gr CO₂-Kartuschen
- Luftpumpe FP für RD206-CO₂
- CO₂-Versorgung COD für RD206-AIR
- zusätzlicher Lauf BAP11 (11mm) für 1-5ml
- zusätzlicher Lauf BAP13 (13mm) für 5-20ml
- zusätzlicher Lauf BAP16 (16mm) für 1-20ml
- Kurzlauf

8. Garantie

Garantiebedingungen (D)

Wir unterziehen unsere Geräte umfassenden Qualitätskontrollen. Um Sie in Ihrem Vertrauen in das Produkt zu bestärken, gibt TeleDart® Ihnen die nachfolgende Herstellergarantie. Ihre gesetzlichen Rechte aus dem Kaufvertrag werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Es gelten die Garantieleistungen gemäß den nachstehenden Bedingungen:

1. Für dieses Gerät leisten wir eine Funktionsgarantie von 20 Jahren. Diese beginnt mit dem Zeitpunkt des Erwerbs durch den Endabnehmer.
2. Es liegt im Ermessen des Herstellers, ob die Garantieleistung durch Reparatur oder Austausch des Gerätes oder durch Austausch der defekten Teile erfüllt wird. Ersetzte Geräte gehen in unser Eigentum über. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
3. Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Regelungen Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einen Fertigungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind.
4. Sollte es erforderlich sein eine Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an Ihren TeleDart® Fachhändler oder direkt an uns. Die Anschriften entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung oder unserer Internetseite www.teledart.com. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörtteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und einen Defekt verursacht haben.
5. Geräte für die Garantieleistung beansprucht wird, sind dem Verkäufer oder einem autorisierten TeleDart® Fachhändler zu übergeben oder zuzusenden. Bei einer Zusendung liegt das Transportrisiko beim Einsender. Versand-, Transport-, Wege- sowie Arbeitskosten des Endabnehmers werden nicht erstattet.
6. Sollte ein Garantieanspruch angemeldet werden, so ist jeweils der Kaufbeleg mit Kauf- und/oder Lieferdatum sowie eine detaillierte Fehlerbeschreibung vorzulegen. Weiterhin muss die Seriennummer am Gerät eindeutig lesbar sein.
7. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst durch Schäden, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, oder durch Schäden aus anomalen Umweltbedingungen, sachfremden Betriebsbedingungen, unsachgemäßer Handhabung oder Missbrauch entstanden sind. Ebenso kann keine Garantie übernommen werden, wenn die Schäden oder Mängel am Gerät auf Nichtbeachtung der Bedienungshinweise zurückzuführen sind.
8. Sollte das Gerät in einem anderen Land benutzt werden, als in dem, in welchem es entwickelt und produziert wurde, müssen eventuell bauliche Veränderungen vorgenommen werden, um es an die technischen, bzw. sicherheitstechnischen Normen dieses Landes anzupassen. Solche Veränderungen sind nicht auf Material- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen und werden von dieser Garantie nicht abgedeckt. Kosten für solche Veränderungen und für eventuelle Schäden, die daraus entstehen, werden nicht erstattet.
9. Die Garantie ist produktbezogen und kann innerhalb der Garantiezeit von jeder Person, die das Gerät legal erworben hat, in Anspruch genommen werden. Die Rechte des Käufers nach dem jeweils geltenden nationalen Recht, d.h. die aus dem Kaufvertrag abgeleiteten Rechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer, wie auch andere Rechte werden von dieser Garantie nicht angetastet. Soweit die jeweils nationale Gesetzgebung nichts anderes vorsieht, beschränken sich die Ansprüche auf die in dieser Garantie genannten Punkte. Die TeleDart GmbH & Co. KG sowie deren Fachhändler haften nicht für indirekten, bzw. in Folge auftretenden Verlust oder Schaden an Personen, Tieren oder für den Verlust an Spritzen, Kanülen oder Medikamenten.
10. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Gang. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät. Im Falle einer Ersatzlieferung behalten wir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsanrechnung für die bisherige Nutzungszeit vor.
11. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist - ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten ab 15.09.2009.

Beachten Sie unser weiteres Kundendienst-Angebot:

Auch nach Ablauf der Garantie stehen wir oder unsere Fachhändler Ihnen gerne zur Verfügung, denn wer sich für TeleDart® entscheidet, braucht sich um guten Service nicht zu sorgen.

TeleDart GmbH & Co. KG
Obere Heide 8
67368 Westheim / Deutschland
(Stand 12.11..2018)